

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI JOHOR
SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN HARIAN PERALATAN PERGIGIAN

Lokasi :

Bulan:

Tahun:

Peralatan	Tarikh	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Catatan					
Compressor Kunci valve sebelum digunakan Di akhir hari buka kunci valve kompressor.																																						
Dental Unit cum Chair Pastikan air suling dalam balang mencukupi. Jalankan handpis bersama bur untuk bersihkan minyak.																																						
Portable Dental Unit Pastikan paras air suling mencukupi.																																						
Handpiece Jalankan handpis. Pastikan air keluar selama beberapa saat(high speed) Akhir hari: jalankan(pastikan air keluar high speed) Sembur minyak handpis ke dalam handpis.																																						
Scaling Unit Pasang/keluar scaler tip secara "upright". Steril / disinfeksi selepas rawatan.																																						
Autoklaf Pastikan air suling dalam tangki sentiasa mencukupi.																																						
Amalgamator (Bersihkan /lap bahagian luar amalgamator. Periksa kandungan aloi dan raksa. Cuci saluran unit.																																						
Ultrasonic Cleaner Pastikan larutan ultrasonic mencukupi. Akhir hari, bersihkan unit dan tukar larutan.																																						
Vaculyser Tukar tip saliva ejector selepas setiap pesakit. Bersihkan botol Vaculyser.																																						
Light Cure Unit Disinfeksi dan aktifkan cahaya polimeran.																																						
Mikromotor Pasang dan jalankan handpis.																																						
Water Distiller Pastikan air dalam tangki mencukupi																																						
Tanda tangan																																						
Tanda tangan Penyelia																																						