

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI JOHOR
SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN HARIAN
PERALATAN PERGIGIAN

Bulan:

Tahun:

Lokasi :

Peralatan / Aset	Tarikh	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Catatan
1. Kompresor - Hidupkan suis 'suction unit' pada awal hari dan matikan pada penghujung hari - Pastikan 'valve' ditutup sebelum digunakan - Buka 'valve' dan keluarkan angin sepenuhnya selepas digunakan pada penghujung hari																																	
2. Suction Unit / Portable Suction Unit (Vaculyser) - Hidupkan suis unit pada awal hari dan matikan pada penghujung hari - Disinfeksi 'suction unit' menggunakan larutan disinfeksi yang dikhaskan - Bersihkan botol 'Vaculyser' setiap hari																																	
3. Dental Chair cum Unit (DCCU) / Portable Dental Unit (PDU) - Pastikan paras air suling mencukupi - Pastikan 'stopcock' dibuka pada awal pagi dan ditutup pada penghujung hari (jika berkaitan)																																	
4. Hanpis - Operasikan hanpis bersama bur sebelum digunakan - Pastikan air mengalir selama beberapa saat (kelajuan tinggi) - Ulang langkah sama pada penghujung hari - Jalankan proses pelinciran hanpis dengan minyak																																	
5. Scaler Unit Pasang dan keluarkan 'scaler tip' dalam posisi tegak (upright)																																	
6. Autoklaf - Pastikan punca kuasa elektrik mesin autoklaf tidak berkongsi dengan peralatan elektrik yang lain - Hidupkan suis pada awal hari dan matikan pada penghujung hari - Pastikan paras air suling dalam tangki sentiasa mencukupi																																	
7. Capsule Mixer/ Alginate Mixer Bersihkan mesin selepas digunakan																																	
8. Ultrasonic Cleaner - Pastikan larutan pencuci mencukupi - Pada penghujung hari: - Bersihkan mesin - Tukar larutan pencuci																																	
9. Light Cure Unit - Uji dan aktifkan cahaya polimerisasi sebelum digunakan - Disinfeksi unit selepas setiap pesakit dengan menggunakan 'disinfection wipe'																																	
10. Micromotor Unit Operasikan hanpis sebelum digunakan																																	
11. Water Distiller Pastikan paras air dalam tangki mencukupi																																	
Tandatangan																																	
Tandatangan Penyelia																																	